



MEDIWIPES DM PREMIUM Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni 100szt FLOWPACK zielone - MEDILAB 3



32,90 zł (brutto)

Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia. Dezynfekcja małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych.

Szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania, delikatne dla powierzchni
Preparat do użytku profesjonalnego.

- wykazują szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz aktywne wobec wirusów (Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Herpes, Corona, Rota, Adeno, Noro)
 - czas działania: 5 minut
 - dedykowane do materiałów wrażliwych na działanie alkoholu
- znajdują szerokie zastosowanie do dezynfekcji i mycia delikatnego wyposażenia, które nie może być dezynfekowane poprzez zanurzenie (np. sprzęt rehabilitacyjny, kable, turbiny, pasy do masażu)
 - mogą być stosowane na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych
- dostępne w różnych opakowaniach, w tym w komfortowym opakowaniu typu flow-pack, foliowe opakowanie wyposażone w klips chroniący włókninę przed wysychaniem, zawierającym chusteczki w dużym rozmiarze i wysokiej gramaturze
- Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
 - Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

SPOSÓB UŻYCIA:

Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę.
Przetrzeć chusteczką całą powierzchnię dezynfekowanego wyposażenia.

Odczekać zalecany czas ekspozycji - min. 5 min.

W razie potrzeby powtórzyć procedurę.

Nie słuکیwać. Pozostawić do wyschnięcia.

Pojemnik z chusteczkami szczelnie zamknąć.